

Patentované a klinicky testované světlo BIOPTRON:

- pomáhá zmírňovat bolest
- podporuje hojení ran
- působí protizánětlivě



Postižené místo očistíme a před aplikací použijeme **Oxy spray**.



Svítíme **kolmo** na postižené místo.



Dodržujeme vzdálenost **10 cm.**

**BIOPTRON®**  
LIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

## JAK POUŽÍVAT BIOPTRON základní indikace



**Zepter International s.r.o.**  
Spálená 55, 110 00 Praha 1  
tel.: 221 990 838  
[bioptron@zepter.cz](mailto:bioptron@zepter.cz)

Celkové účinky					
INDIKACE	POČET APLIKACÍ	DĚLKA APLIKACE ( v min.)			POZNÁMKA
		COMPACT	PRO 1	B 2	
PODPORA OBRANYSCHOPNOSTI	denně	15	10	10	

Kožní lékařství a chirurgie					
INDIKACE	POČET APLIKACÍ	DĚLKA APLIKACE ( v min.)			POZNÁMKA
		COMPACT	PRO 1	B 2	
OPARY	3–5	15	10	5	ozářit ihned po prvních příznacích
PÁSOVÝ OPAR	5–7	15	10	5	ozářit ihned po prvních příznacích
JIZVA KRÁTCE PO OPERAČNÍM ZÁKROKU	10	15	10	5	
JIZVA TŘI A VÍCE MĚSÍCŮ PO OPERACI	20–25	20	10	5	
BÉRCOVÝ VŘED	2x denně	20	15	10	dlouhodobá léčba
PROLEŽENINY	2x denně	15	10	5	
POPÁLENINY	2x denně	15	10	5	
AKNÉ	10	15	10	5	
ATOPICKÝ EKZÉM	10	15	10	5	
LUPÉNKA	denně	20	15	10	dlouhodobá léčba
SEBEROICKÁ DERMATITIDA	denně	20	15	10	dlouhodobá léčba

Postižení pohybového aparátu					
INDIKACE	POČET APLIKACÍ	DĚLKA APLIKACE ( v min.)			POZNÁMKA
		COMPACT	PRO 1	B 2	
AKUTNÍ ZÁNĚT ŠLACH A SVALOVÝCH FASCIÍ	10–15	20	10	5	
CHRONICKÝ ZÁNĚT ŠLACH A SVALOVÝCH FASCIÍ	25–50	15	10	5	
ARTRÓZA KLOUBŮ	25–50	15	10	5	ozařujte kloubní štěrbiny
SVALOVÉ SPASMY	5–10	20	15	10	
BOLESTI PODĚL PÁTEŘE	10	20	15	10	
KONTUZE	5–10	20	15	10	
HEMATOM	10	20	15	10	
MECHANICKÉ POŠKOZENÍ SVALŮ	15–20	20	15	10	podle velikosti defektu
MECHANICKÉ POŠKOZENÍ TKÁNĚ	15	20	15	10	podle velikosti defektu
DEGENERATIVNÍ PROCESY	denně	20	15	10	
ARTRITIDY	denně	20	15	10	

Gynekologie a porodnictví					
INDIKACE	POČET APLIKACÍ	DĚLKA APLIKACE ( v min.)			POZNÁMKA
		COMPACT	PRO 1	B 2	
POVRCHOVÉ PORANĚNÍ V OBLASTI RODIDEL	3–5	10	8	5	
ZANĚT BARTHOLINIHO ŽLÁZY	5	10	8	5	
HERPES GENITALIS	5–7	10	8	5	
SVĚDĚNÍ V OBLASTI GENITÁLU	25–50	15	10	5	možno použít fialový filtr
HEMATOM V OBLASTI GENITÁLU	10	12	8	5	
HEMATOM NA PRSU	15–20	15	10	5	
JIZVA PO NÁSTŘIHU HRÁZE NEBO CÍSAŘSKÉM ŘEZU IHNEDE PO PORODU	5–10	15	10	5	
JIZVA PO NÁSTŘIHU HRÁZE NEBO CÍSAŘSKÉM ŘEZU MĚSÍC PO PORODU	10–20	15	10	7	
PREVENCE ZÁNĚTU KOJÍCÍHO PRSU	denně	10	8	5	
PORANĚNÍ PRSNÍ BRADAVKY	2x denně	10	8	5	
STRIE PO PORODU	denně	15	10	5	dlouhodobě v závislosti na elastičnosti kůže
STRIE ŠEST MĚSÍCŮ PO PORODU A STARŠÍ	30–50	15	10	5	dlouhodobě v závislosti na elastičnosti kůže

Stomatologie					
INDIKACE	POČET APLIKACÍ	DĚLKA APLIKACE ( v min.)			POZNÁMKA
		COMPACT	PRO 1	B 2	
OPAR	3–5	10	8	5	
AFTY, EROZE A OTLAČENINY	3–5	15	10	5	
RÁNA PO VYTRŽENÍ ZUBU	10–15	15	10	5	
ZÁNĚT DÁSNÍ	10–20	15	10	5	nezapomínat na masáž dásní
BOLESTI ČELISTNÍHO KLOUBU	10–15	15	10	5	
BOLESTI TROJKLANÉHO NERVU	10–15	15	10	5	